

Barre NobelProcera™ Overdenture sur implant

PRÉREQUIS POUR LA NUMÉRISATION DU MODÈLE RÉFÉRENCE

Lorsque vous envoyez votre commande de barre sur implant pour être numérisé, veuillez considérer les informations suivantes. **Toutes commandes ne répondant pas aux exigences seront retournées.**

Modèle de référence avec gencive amovible

Les répliques enfouies dans la pierre rendent la procédure de numérisation impossible.

Toujours utiliser des gencives amovibles.



Toujours nettoyer la cire des modèles



Toujours inclure une gencive amovible



Toujours bien dégager autour des répliques



Modèle propre



Gencive amovible




Montage de dents en cire en bon état

Nouvelles répliques

Toujours utiliser des répliques d'implant neuves pour votre modèle.

Toute réplique mobile ou endommagée, avec même la plus légère égratignure, mènera à un mauvais ajustement de la barre d'implants sur votre modèle (non passive).

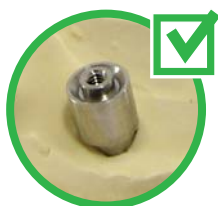

Toujours utiliser des répliques neuves ou en très bon état




Ne pas envoyer de répliques mobiles



Ne pas envoyer de répliques endommagées

Éléments recommandés - optionnels


Vous pouvez inclure la matrice de montage, l'intaglio et la barre de vérification avec le modèle. Ceux-ci seront utiles lors de la numérisation afin d'aligner correctement les dents avec le modèle. Ne pas inclure l'articulateur ou le socle du modèle.

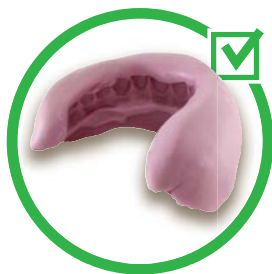

Matrice de montage



Intaglio

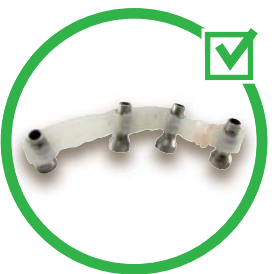

Barre de vérification



Articulateur



Socle du modèle